


ANLEITUNG ACTEMRA®-FERTIGPEN

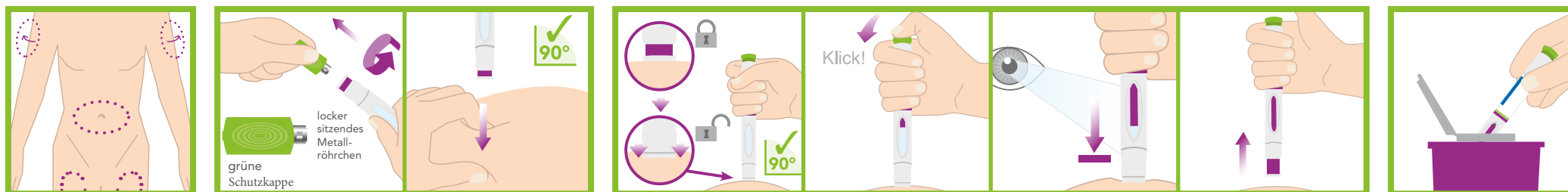

1

Vorbereiten der Injektionsstelle

- Die empfohlenen Injektionsstellen sind die Vorderseiten beider **Oberschenkel** in der Mitte sowie der **Bauch** mit Ausnahme der Region 5 cm um den Nabel herum. Bei Injektion durch medizinisches Fachpersonal auch die Aussenseite der Oberarme.
- Niemals in Narben, Muttermale, oder andere empfindliche Hautbereiche injizieren.
- Desinfizieren Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.
- Wählen Sie bei jeder Injektion eine andere Körperstelle, die mindestens 2,5 cm von der vorherigen entfernt ist.

2

Vorbereiten des Fertigpens

- Nehmen Sie den Fertigpen aus der Schachtel und **lassen Sie ihn 45 Min. bei Raumtemperatur** (15 °C bis 25 °C) **liegen**.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Packung und dem Fertigpen.
- Ziehen Sie die Schutzkappe ab und verwenden Sie den Pen **innerhalb von 3 Minuten**.
- Berühren Sie nicht den vorderen Teil des Pens, unterhalb des Sichtfensters.
- Bilden Sie eine **lockere Hautfalte** an der desinfizierten Injektionsstelle, um die Injektionsstelle zu stabilisieren.

3


Injektion des Medikaments

- **Drücken Sie den Fertigpen** in einem **90°-Winkel** auf die Hautfalte auf, bis der Nadel-schutz nicht mehr sichtbar ist.
- **Drücken Sie den grünen Aktivierungsknopf und halten Sie ihn** bis das Sichtfenster vollständig mit dem violetten Indikator ausgefüllt ist (ca. 10 Sekunden). Ein Klickgeräusch zeigt den Beginn der Injektion an.
- **Lassen Sie den Aktivierungsknopf erst los, wenn sich der violette Indikator im Sichtfenster nicht mehr bewegt.**
- Ziehen Sie den **Fertigpen** im **90°-Winkel** von der Haut zurück.

4


Entsorgen des Fertigpens

- Entsorgen Sie den benutzten Fertigpen und die Schutzkappe in einen dafür vorgesehenen Spritzenbehälter.

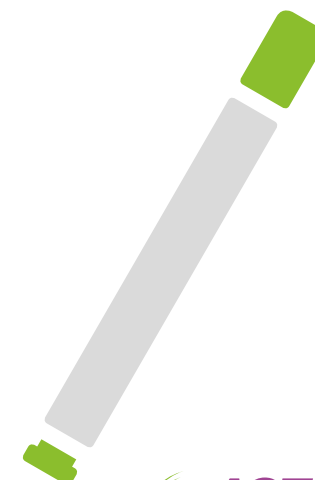

AKTIVIERUNGSKNOPF

360°-SICHTFENSTER

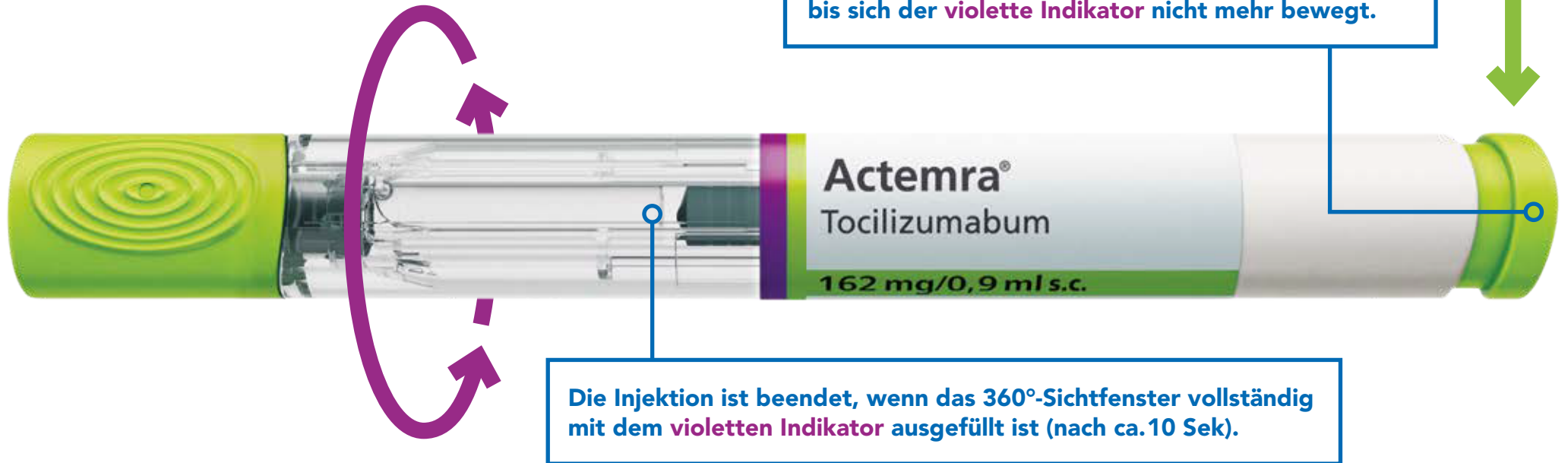

Ausführliche Informationen finden Sie in der Packungsbeilage Ihres Actemra®-Fertigpens oder in der publizierten Patienteninformation von Actemra® (Tocilizumab) unter www.swissmedinfo.ch.



Roche Pharma (Schweiz) AG
Grenzacherstrasse 124
4058 Basel

 **ACTEMRA®**
tocilizumab